




OUP 環標示




## OUP 系統


- OUP 刀頭 (藍色盒貼紙)
- OUP 吸環 (OUP 標示和藍色或黃色止動)

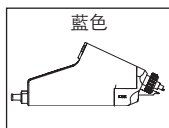

參考號 19345

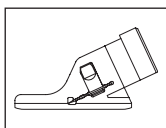

參考號 19393/XX

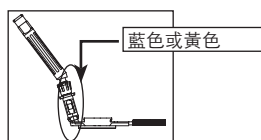

參考號藍色 19391/-1  
19391/0  
參考號黃色 19391/1  
19391/2  
19391/3

## 警告

切勿將 EPI-K™系統配套 OUP 組件使用

## 目次


帶刀片的 One Use-Plus 一次性使用刀頭。圖 1

## 指導

### A 將機頭裝配在刀頭上

- 1 / 從外皮袋取出塑膠內包裝。
- 2 / 將包裝在刀片螺釘向下放置 圖 2A 並且打開包裝的上部 圖 2B
- 3 / 順時針擰緊鎖緊螺釘，以固定刀頭於機頭上。核實刀頭是否與機頭牢固擰緊。不應存在刀頭轉動 圖 3/圖 4/圖 5。
- 4 / 一旦裝配好，顯微鏡下視檢刀片。
- 5 / 使用前，用 BSS® (Alcon 的商標) 或另一種適宜溶液潤滑刀片。
- 6 / 啟動機頭以檢查刀片是否恰當接合並振動

### B 將機頭裝配在吸環上

- 1 / 在吸環的導軌中插入刀頭時，機頭應當距吸環的金屬螺紋軸呈 45° 角，以防止軸觸碰刀頭和分離器組合體 圖 6。一旦刀頭完全插入吸環的導軌中，柔和減少 45° 角至 0° 並將刀頭略微推入吸環 圖 7。
- 2 /  警告!切勿用螺紋軸觸碰刀片 (如以下圖片中所示)，這將會損壞刀片的邊緣 圖 8。

### C 拆卸 OUP 一次性使用刀頭

欲拆卸 OUP 一次性使用刀頭，將它插入包裝並反時針擰松鎖緊螺釘。將一切東西丟棄在生物危害容器中 圖 9/圖 10/圖 11。

Fig.1



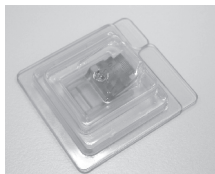


Fig.2

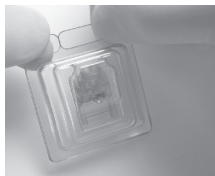

2A

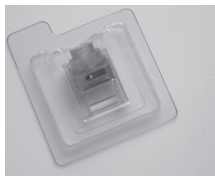

2B

Fig.3

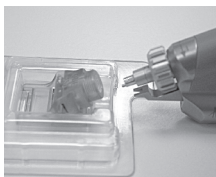


Fig.4



Fig.5

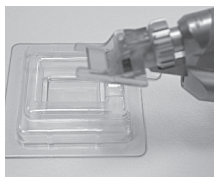


Fig.6

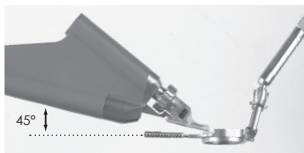


Fig.7



Fig.8

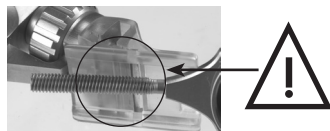


Fig.9


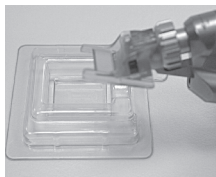


Fig.10



Fig.11

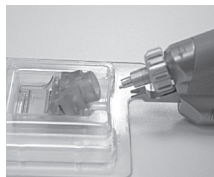

# To obtain more information

**MORIA SA**  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
FRANCE  
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74  
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)



**MORIA Inc**  
1050 Cross Keys Drive  
Doylestown, PA 18902  
USA  
Phone: (800) 441 1314  
Fax: +1 (215) 230 7670  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**Moria Japan K.K.**  
Arcadia Building 6F  
1-12-3 Kanda  
SudachoChiyoda-Ku Tokyo  
101-0041  
JAPAN  
Phone: 81-3-6260-8309  
Fax: 81-3-6260-8310  
[www.moriajapan.com](http://www.moriajapan.com)

**Moria Commercial (CHINA) CO., LTD.**  
上海目利亚贸易有限公司  
Room H 6F Kall Building NO.432  
West Huai Hai Road, Changning  
district, Shanghai 200052, P.R.C  
中国上海市长宁区淮海西路432号凯  
利大厦6楼08室  
Tel/Fax: +86 021 52586095  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**Moria**  
Ophthalmic Instruments