

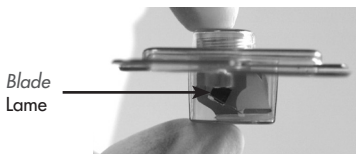
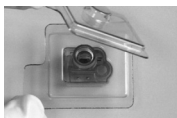


Information sheet for mounting the CB Single-Use head
Not for patient/only for donor graft.**Notice de montage de la tête CB Single-Use****Ne pas utiliser sur patient/uniquement pour greffon donneur.***Contents**Composition du Pack**Microkeratome head with blade**Tête de microkératome avec sa lame*

- 1** Remove inner plastic pack from outer peel pouch.
Retirer le pack du sachet protecteur.
- 2** Place pack with blade side down.
Placer le pack de façon à ce que le côté de la lame soit en bas.
- 3** Remove top of pack.
Ouvrir la partie supérieure du pack.

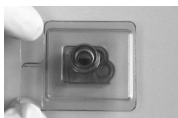

- 4** Check the caliber of the desired head (marked on the back of the head).
Vérifier le calibre de la tête désirée (marqué sur l'arrière de la tête).

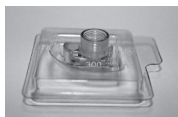

- 5** Keep head in pack while screwing into turbine.
En maintenant la tête dans le pack, la visser sur la turbine.



#19178/XXX

IMPORTANT

**CHECK FOR
UNDAMAGED AND
UNOPENED PACK.
THIS PACK IS
STERILE AND FOR
SINGLE USE.**

**READ THE MORIA
CB
MICROKERATOME
USER MANUAL
CAREFULLY. #65078**

**VÉRIFIER
L'INTÉGRITÉ
DU SACHET
PROTECTEUR
INDIVIDUEL
DE STERILITE
AVANT USAGE.
CE PACK EST
STERILE ET À
USAGE UNIQUE.**

**VOIR LES
CONSIGNES
D'UTILISATION
DÉTAILLÉES ET LES
AVERTISSEMENTS
FIGURANT DANS
LE MANUEL
UTILISATEUR DU
MICROKERATOME
CB. #65078**



**Caution : U.S.
(FEDERAL) Law
restricts this device
to sale by or on
the order of a
physician**

- 6** While assembled, inspect blade under microscope. Lubricate the blade and head with BSS.

Après l'assemblage, inspecter la lame au microscope. Humidifier la lame et la tête avec du sérum physiologique ou toute autre solution ophtalmique.

- 7** Activate turbine to check that blade is engaged and oscillates. Activer la turbine afin de vérifier que la lame est bien engagée et oscille correctement.

- 8** Proceed to the cut of the graft on the MORIA reusable artificial chamber or the MORIA single-use artificial chamber.

Procéder à la découpe du greffon sur la chambre artificielle MORIA réutilisable ou sur la chambre artificielle MORIA à usage unique.



- 9** After use, place the head back in the packaging and unscrew it. Discard everything into an appropriate container for disposal (according to the regulations in force).

Après usage, remettre la tête dans le pack et dévisser la tête. Placer tous les éléments dans un conteneur approprié pour destruction (selon la réglementation en vigueur).



WARNING

Use the CB Single Use heads exclusively with accessories manufactured by Moria for the CB microkeratome; use of other accessories can damage the microkeratome and may cause significant patient injuries. Please read the user manual of the Moria CB microkeratome before use.

AVERTISSEMENT

N'utiliser les têtes CB Single Use qu'avec les différents éléments fournis par MORIA pour le microkératome CB; l'emploi de tout autre élément que ceux fournis par MORIA risquerait d'endommager le microkératome et d'être cause de graves blessures pour le patient. Il est impératif de se reporter au mode d'emploi pour l'utilisation du microkératome.

MORIA#65076-C-01.2017

Moria

MORIA SA
FRANCE
+33 (0) 1 46 74 46 74
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com



CE
0459

MORIA Inc
USA
(800) 441 1314
www.moria-surgical.com

MORIA JAPAN KK
JAPAN
+ 81 3 5842 6761
www.moriajapan.com

MORIA in CHINA
CHINA
+ 86 21 5258 5068
www.moria-surgical.com.cn