


EPI-K™ SYSTEM

2. **⚠ WARNING! Do not touch the separator (as shown below in the picture) with the threaded shaft, it would damage the edge of the separator (8).**




⚠ ATTENTION! Ne pas toucher le séparateur (comme indiqué ci dessous) avec la tige filetée car il endommagerait l'extrémité du séparateur (8).

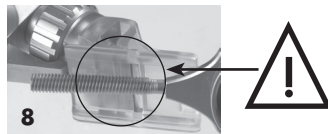

C Disassemble EPI-K single use head **Démonter la tête EPI-K à usage unique**

To disassemble EPI-K™ single use head, insert it into the pack and unscrew the locking screw anticlockwise. Discard everything in a biohazard container (9-10-11).

Afin de désassembler la tête EPI-K™ à usage unique, remettre la tête dans le pack et dévisser l'écrou du moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Détruire l'ensemble dans un conteneur adéquat (9-10-11).

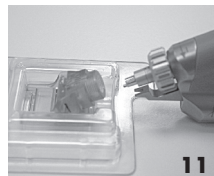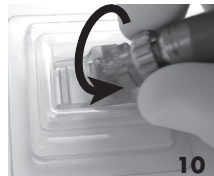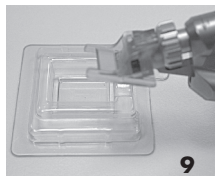

Moria

MORIA SA
FRANCE
CE
+33 (0) 1 46 74 46 74
moria@moria-int.com
0459 www.moria-surgical.com

MORIA Inc
USA
(800) 441 1314
moria@moriausa.com
www.moria-surgical.com

MORIA JAPAN KK
JAPAN
+81 3 5842 6761
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

MORIA in CHINA
CHINA
+86 21 5258 5066/5068
moria_shanghai@yahoo.com
www.moria-surgical.com.cn

MORIA #65054-C-12.2016

EPI-K™ system / Système EPI-K™

- EPI-K™ handpiece (green color) / Moteur EPI-K™ (vert)
- EPI-K™ heads (box sticker of green color) / Têtes EPI-K™ (étiquette boîte verte)
- EPI-K™ suction ring (EPI-K labelling and stop of green color) / Anneau de succion EPI-K™ (marqué EPI-K et butée verte)




WARNING / ATTENTION


Do not use with EPI-K™ / Ne pas utiliser avec l'EPI-K™ :

- OUP handpiece (blue color) / Moteur OUP (bleu)
- OUP heads (box sticker of blue color) / Têtes OUP (étiquette boîte bleue)
- OUP suction ring (OUP labelling and stop of blue color) / Anneau de succion OUP (marqué OUP et butée bleue).
- OUP head and ring set single use (box sticker of blue color) / Set OUP tête et anneau à usage unique (étiquette boîte bleue).


Epi-K ring
labelling
Marquage Epi-K
sur l'anneau

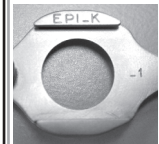


EPI-K™ SYSTEM

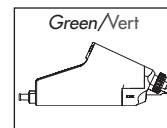

Ref. : 19342

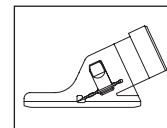


Ref. : 19390

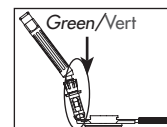


Ref. : 19389


OUP SYSTEM

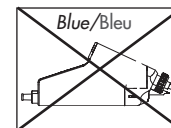

Ref. : 19345

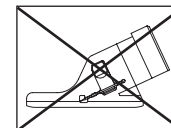


Ref. : 19393
19336
19337

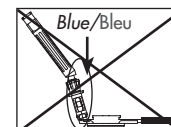

Ref. : 19391

Information sheet for the setting of the Epi-K™ Single use head
Notice de montage de la tête Epi-K™

A Assemble the head on the handpiece
Assembler la tête sur le moteur


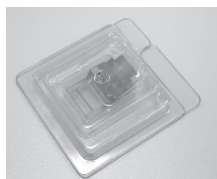


Contents
 Composition du pack



Epikeratome head single use with separator
 Tête de l'épikératome à usage unique avec son séparateur.

1. Remove inner plastic pack from outer peel pouch
 Retirer le pack du sachet pelable

2. Place the pack with head screw up (1) and open top of the pack (2)
 Placer le pack de façon à ce que le pas de vis de la tête soit vers le haut (1) et ouvrir la partie supérieure du pack (2).

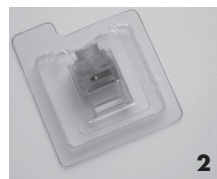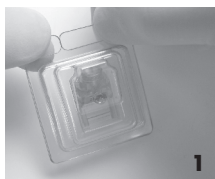

3. Screw the locking screw clockwise to fix the head on the handpiece. Check that the head is screwed on tightly to the handpiece. There should be no rotation of the head (3-4-5).
 Visser l'écrou du moteur sur la tête dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifier que la tête est bien serrée sur le moteur. La tête ne doit pas avoir de rotation une fois montée (3-4-5).

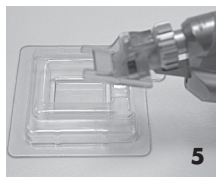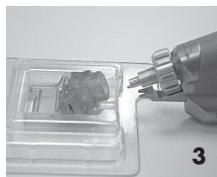


4. Once assembled, inspect separator under the microscope.
 Après assemblage, inspecter le séparateur sous microscope.

5. Lubricate the EPI-K™ separator prior to use with BSS® (Trade mark of Alcon) or another appropriate solution.
 Lubrifier le séparateur EPI-K™ avant la découpe avec du BBS® (Marque déposée Alcon) ou toute autre solution appropriée.

6. Activate the handpiece to check if the separator is engaged and oscillates properly.
 Activer le moteur afin de vérifier que le séparateur est bien engagé et oscille correctement.

B Assemble the handpiece on the suction ring
Assembler le moteur sur l'anneau de succion

1.

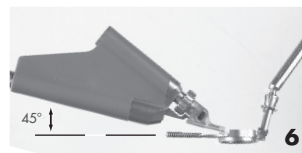

When inserting the head in the rails of the suction ring, the handpiece should be at a 45 degree angle from the metal threaded shaft of the ring to prevent the shaft from touching the head and separator assembly (6). Quand vous insérer la tête dans le rail de guidage de l'anneau de succion, le moteur doit être à un angle de 45° par rapport à la tige filetée de l'anneau afin d'empêcher que le séparateur ne s'endommage en touchant l'anneau (6).

Once the head is well inserted in the rails of the suction ring, gently decrease the 45° angle to 0° and advance slightly the head into the ring (7). Une fois la tête insérée dans les rails de guidage de l'anneau, descendre doucement de l'angle à 45° jusqu'à 0°. Avancer ensuite délicatement la tête dans l'anneau (7).