



# #19168

Année de première mise sur le marché : 2012

## EN Addendum for user manual #65009



In addition to guide rings for ONE microkeratome (#19164) and for CBM microkeratome (#19171) that guide microkeratome heads on ALTK artificial chamber (#19161) equipped with its universal chamber cover (#19162), Moria informs the availability of a new guide ring to use One Use Large-Cut (OU LC) heads for artificial chamber (#19184/xxx).

## FR Addendum au manuel utilisateur #65009



En complément des anneaux guides pour microkératome ONE (#19164) et microkératome CBM (#19171) permettant d'utiliser les têtes pour chambre artificielle ALTK (#19161) équipée de la cloche universelle (#19162), Moria vous informe de la disponibilité d'un nouvel anneau guide permettant d'utiliser les têtes One Use Large-Cut (OU LC) pour chambre artificielle (#19184/xxx).

### 1- Indications

OU LC heads for artificial chamber (#19184/xxx), guided by the OU LC Guide Ring for ALTK chamber (#19168), are indicated for the creation of complete lamellar resection (without hinge) for donor graft preparation during keratoplasty surgery.

### 2- Reference & Designation

- **Reference:** #19168
- **Designation:** One Use Large-Cut Guide Ring for ALTK chamber

### 3- Maintenance

For the maintenance of the One Use Large-Cut Guide Ring for ALTK chamber (#19168), please refer to the guide rings maintenance mentioned in the user manual #65009.

### 1- Indications

Les têtes OU LC pour chambre artificielle (#19184/xxx), guidées par l'anneau guide OU LC pour chambre ALTK (#19168), permettent de réaliser une résection lamellaire cornéenne complète (sans charnière) pour la préparation du greffon donneur lors des chirurgies de greffes de cornée.

### 2- Référence & Désignation

- **Reference :** #19168
- **Designation :** Anneau guide One Use Large-Cut pour chambre ALTK

### 3- Maintenance

Concernant la maintenance de l'anneau guide One Use Large-Cut pour chambre ALTK (#19168), se référer à la maintenance des anneaux guides mentionnée dans le manuel utilisateur #65009.

#### To obtain more information



**MORIA SA**  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
FRANCE  
Phone: +33 (0) 1 46 74 46 74  
Fax: +33 (0) 1 46 74 46 70  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)



**MORIA Inc**  
1050 Cross Keys Drive  
Doylestown, PA 18902  
USA  
Phone: (800) 441 1314  
Fax: +1 (215) 230 7670  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**MORIA JAPAN KK**  
Inami Bldg., 6F  
3-24-2 Hongo Bunkyo-ku  
Tokyo 113-0033  
JAPAN  
Phone: +81 3 5842 6761  
Fax: +81 3 5842 6762  
[www.moriajapan.com](http://www.moriajapan.com)

**Moria Shanghai Office**  
RM4, 10 FL, Kai Li Building  
N°432 Huai Hai West Road  
200052 Shanghai  
CHINA  
Phone: +86 21 5258 5068  
Fax: +86 21 5258 5067  
[www.moria-surgical.com.cn](http://www.moria-surgical.com.cn)

MORIA #65104-C-01.2017

**Moria**  
Leading Innovations in Ophthalmology



# #19168

## ES Apéndice del manual del usuario #65009



Además de los anillos guía para microqueratomo ONE (#19164) y microqueratomo CBM (#19171) para utilizar los cabezales en la cámara artificial ALTK (#19161) equipada con la cubierta universal (#19162), Moria informa de la disponibilidad de un nuevo anillo guía para utilizarlo en los cabezales One Use Large-Cut (OU LC) para la cámara artificial (#19184/xxx).

## 1- Mantenimiento

Para el mantenimiento del anillo guía One Use Large-Cut para la cámara ALTK (#19168), por favor consulte el mantenimiento de anillos guía mencionado en el manual del usuario #65009.

## Referencia y denominación

- **Referencia:** #19168
- **Denominación:** Anillo guía de One Use Large-Cut para la cámara ALTK

## 3- Mantenimiento

Para el mantenimiento del anillo guía One Use Large-Cut para la cámara ALTK (#19168), por favor consulte el mantenimiento de anillos guía mencionado en el manual del usuario #65009.

### Para más información

**MORIA SA**  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony  
FRANCE  
Phone: +33 (0) 1 46 74 46 74  
Fax: +33 (0) 1 46 74 46 70  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)



**MORIA Inc**  
1050 Cross Keys Drive  
Doylestown, PA 18902  
USA  
Phone: (800) 441 1314  
Fax: +1 (215) 230 7670  
[www.moria-surgical.com](http://www.moria-surgical.com)

**MORIA JAPAN KK**  
Inami Bldg, 6F  
3-24-2 Hongo Bunkyo-ku  
Tokyo 113-0033  
JAPAN  
Phone: +81 3 5842 6761  
Fax: +81 3 5842 6762  
[www.morajapan.com](http://www.morajapan.com)

**Moria Shanghai Office**  
RM4, 10 FL, Kai Li Building  
N°432 Huai Hai West Road  
200052 Shanghai  
CHINA  
Phone: +86 21 5258 5068  
Fax: +86 21 5258 5067  
[www.moria-surgical.com.cn](http://www.moria-surgical.com.cn)

MORIA #65104-C-01.2017

